

R-GUARD

单导动态心电图记录仪

Wireless Ambulatory ECG Recorder

SCI-311B SCI-311W

快速使用指南



STARCARE
In care of your ST & AR



扫一扫，下载客户端



深圳星康医疗科技有限公司

电话：0755-86689688

网址：www.starcaretech.com

邮编：518000

邮箱：service@starcaretech.com

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道022号高新工业村B栋
301-3C/3D室

用科技守护心脏健康


设备安装

Installation

1 设备示意图



2 安装电极片

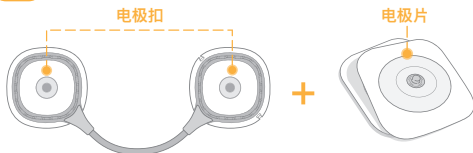

a 扣上电极片




b 撕掉电极片保护膜



c 参考图片位置贴上记录仪



连接设备和安放电极片前须
剃除胸毛并磨去皮角质层。

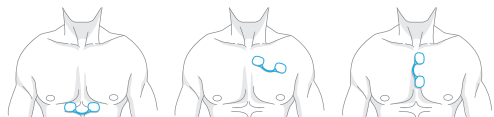

设备操作

Recorder operation

1 开机

长按位于主机端的开机按键大于3秒，开机后记录仪会震动，指示灯会闪烁绿色。



2 设备配对


- a 通过扫描册子背面二维码下载移动客户端。
- b 使用APP扫设备主机端的二维码进行配对。



3 查看波形

通过App查看心电波形。

- 机构版
- 个人版
- 专业版

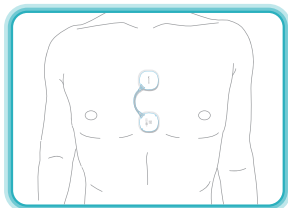

4 事件标记

如有症状或身体不适，可连续快速拍打三下记录仪主机(带开关机键的一侧)进行事件记录。



5 导联脱落



导联脱落时，记录仪会震动伴随着橙色灯闪烁。

记录完成


After Recording

1 取下设备

将心电记录仪从身上取下后，放入充电器底座，注意对准卡槽。

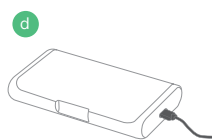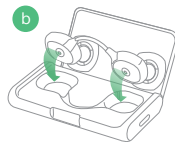

2 数据导出

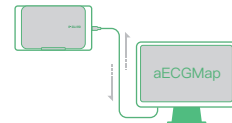

a USB导出

通过USB数据线，将底座连接电脑，通过动态心电图软件(aECGMap)进行数据导出，分析。

b WIFI导出

仅高配版充电器底座支持此功能。具体步骤参考APP"使用帮助"界面。



3 充电

数据导出完成后，USB继续连接电脑或是适配器充电，查看充电指示灯，确认充电完成。



注意：每次使用前，请将设备充满电使用。